
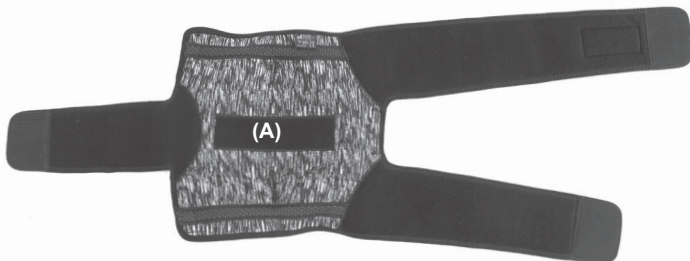


KOD KATALOGOWY	TB-24
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA Z KOMPRESM CIEPŁO/ZIMNO
MODEL	TB-24
CODE	TB-24
TRADE NAME	HOT/COLD AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-24

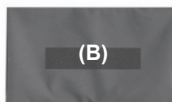

PL: A. Orteza B. Kompres żelowy w pokrowcu




EN: A. Brace B. Hot/cold gel compress in a cover

PL: UWAGA! W celu schłodzenia lub ogrzania kompresu, należy wyjąć go z pokrowca.

EN: ATTENTION! In order to cool or warm the compress, remove it from the cover.


1. PL: Rozepnij ortezę i przypnij kompres żelowy (B) na rzep (1).

EN: Open the brace and fasten the gel compress (B) with Velcro (1).

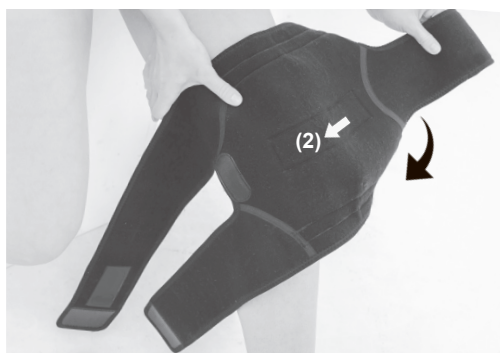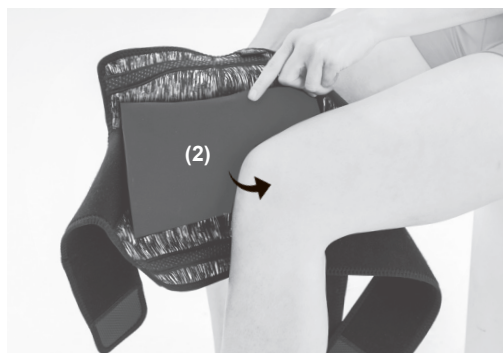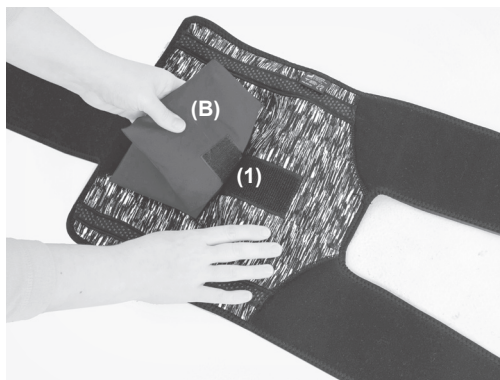


2. PL: Przyłóż ortezę z kompresem do kolana w odpowiednim miejscu (2).

EN: Place the brace with the compress on the knee in the right place (2).

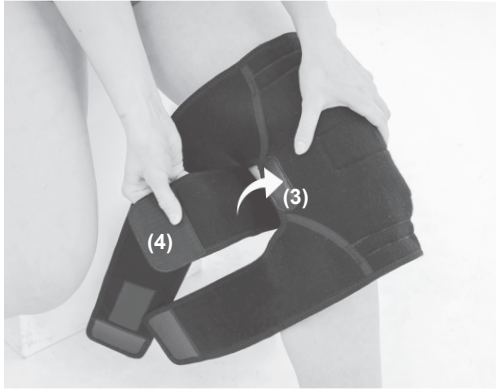

3. PL: Ustabilizuj wyrób na kończynie, zapinając pas (4) na rzep (3).

EN: Stabilize the device on the limb and fasten the Velcro (3) strap (4).

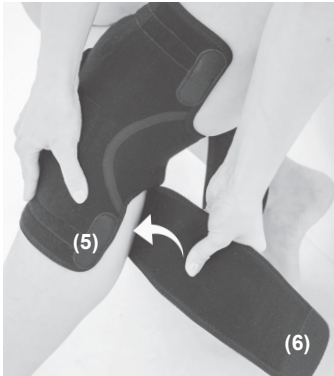

4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy w podanej kolejności (5,6,7,8).

EN: Set the correct compression and fasten the Velcro in the given order (5,6,7,8).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.