


KOD KATALOGOWY	TB-21
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA Z KOMPRESEM CIEPŁO/ZIMNO
MODEL	TB-21
CODE	TB-21
TRADE NAME	HOT/COLD AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-21

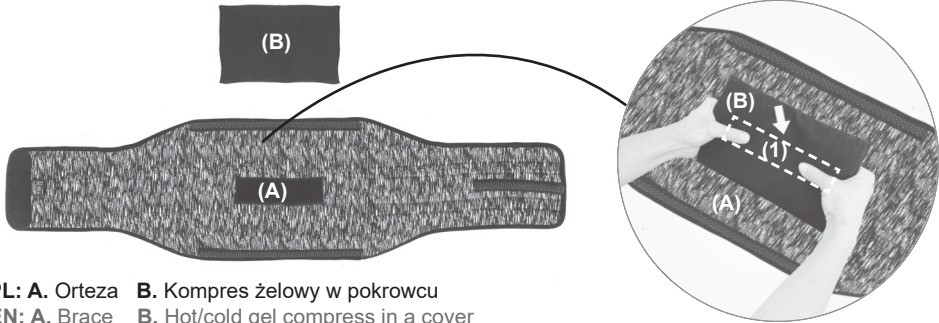

**PL:** A. Orteza B. Kompres żelowy w pokrowcu  
**EN:** A. Brace B. Hot/cold gel compress in a cover

**PL:** **UWAGA!** W celu schłodzenia lub ogrzania kompresu, należy wyjąć go z pokrowca.  
**EN:** **ATTENTION!** In order to cool or warm the compress, remove it from the cover.

**1. PL:** Rozepnij ortezę (A) i przypnij kompres żelowy (B) na rzep (1).  
**EN:** Open the brace (A) and fasten the gel compress (B) with Velcro (1).



**2. PL:** Przyłóż ortezę w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij przednie zapięcie na rzep (2).  
**EN:** Place the orthosis on the lumbosacral region of the spine. Set the correct compression and close the front Velcro closure (2).



**3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe na rzepy (3,4).  
**EN:** Set the correct compression and fasten the Velcro straps (3,4).



**4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

