



KOD KATALOGOWY	TB-26
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA Z KOMPRESEM CIEPŁO/ZIMNO
MODEL	TB-26
CODE	TB-26
TRADE NAME	HOT/COLD AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-26

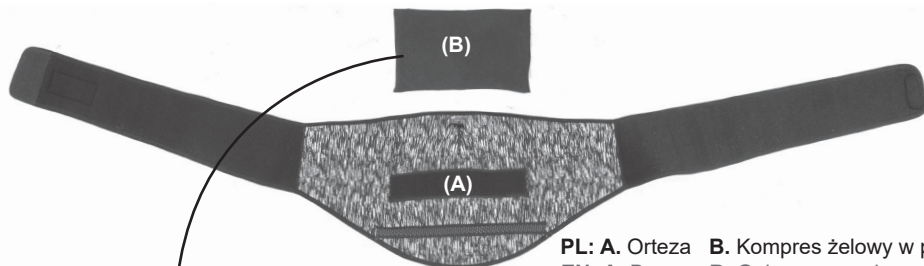

PL: A. Orteza B. Kompres żelowy w pokrowcu
EN: A. Brace B. Gel compress in a cover

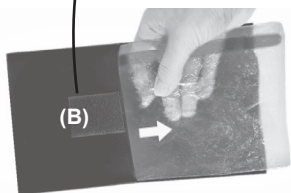


PL: **UWAGA!** W celu schłodzenia lub ogrzania kompresu (B), należy wyjąć go z pokrowca i umieścić:

- a) w zamrażarce
- b) w kuchenke mikrofalowej
- c) lub w gorącej wodzie

EN: **ATTENTION!** In order to cool or warm the compress (B), remove it from the cover and place it:

- a) in the freezer
- b) in the microwave oven,
- c) or in hot water

a)		max. -18°C	120 min.
b)		max. 650W	3x10 s.
c)		max. 80°C	8 min.

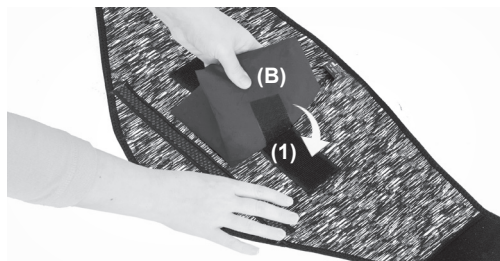


1. PL: Rozepnij ortezę i przypnij kompres żelowy (B) na rzep (1).

EN: Open the brace and fasten the gel pad (B) with Velcro (1).

I. PL: BIODRO
EN: HIP



II. PL: PLECY
EN: BACK

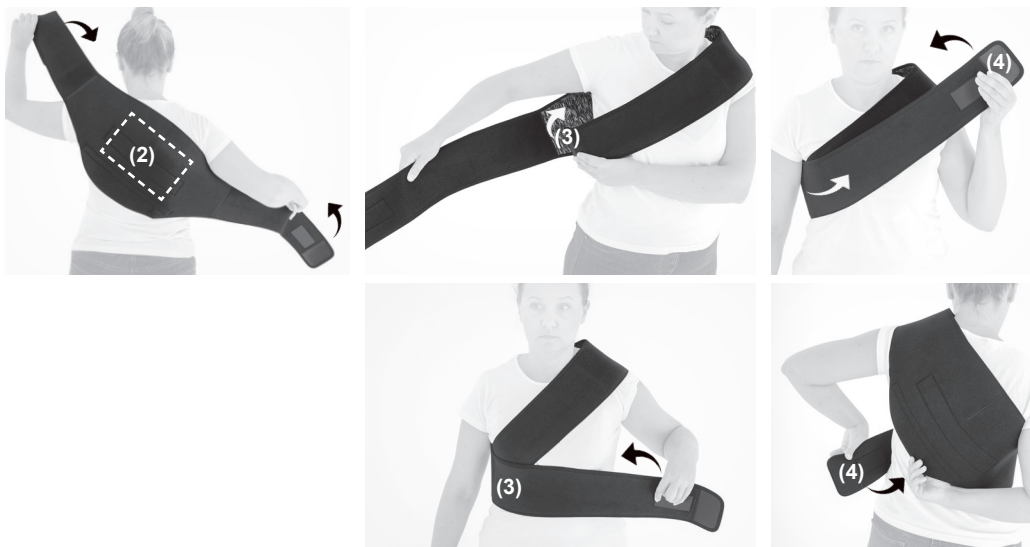


III. PL: ODCINEK LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY KRĘGOSŁUPA
EN: LUMBOSACRAL SECTION OF THE SPINE




3. PL: Przyłóż ortezę z kompresem (B) w odpowiednim miejscu (2). Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pas na biodrze, plecach lub na odcinku lędźwiowo-krzyżowym w podanej kolejności (3,4).

EN: Place the brace with the compress in the right place (2). Set the appropriate compression and fasten the product on your hip, back or lumbosacral section of the spine in the order shown (3,4).

I. PL: BIODRO
EN: HIP

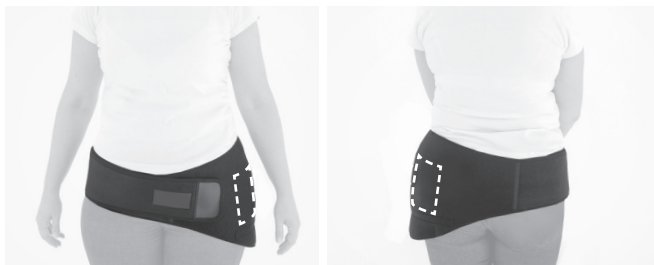

II. PL: PLECY
EN: BACK

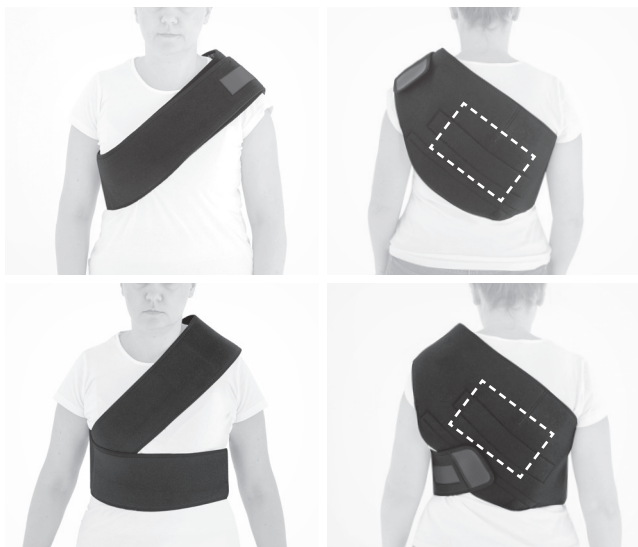

III. PL: ODCINEK LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY KRĘGOSŁUPA
EN: LUMBOSACRAL SECTION OF THE SPINE



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.