



KOD KATALOGOWY	TB-27
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA Z KOMPRESM CIEPŁO/ZIMNO
MODEL	TB-27
CODE	TB-27
TRADE NAME	HOT/COLD AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-27

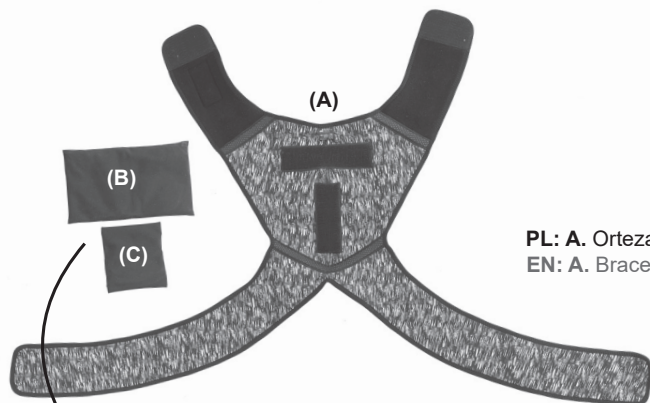

PL: A. Orteza B/C. Kompresy żelowe w pokrowcu
EN: A. Brace B/C. Hot/cold gel compress in a cover

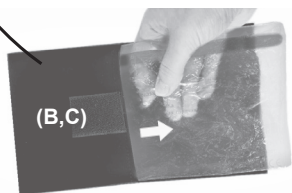

PL: UWAGA! W celu schłodzenia lub ogrzania kompresu (B,C), należy wyjąć go z pokrowca i umieścić:


- a) w zamrażarce
- b) w kuchenke mikrofalowej
- c) lub w gorącej wodzie

EN: ATTENTION! In order to cool or warm the compress (B,C), remove it from the cover and place it:

- a) in the freezer
- b) in the microwave oven,
- c) or in hot water


a)		max. -18°C	120 min.
b)		max. 650W	3x10 s.
c)		max. 80°C	8 min.



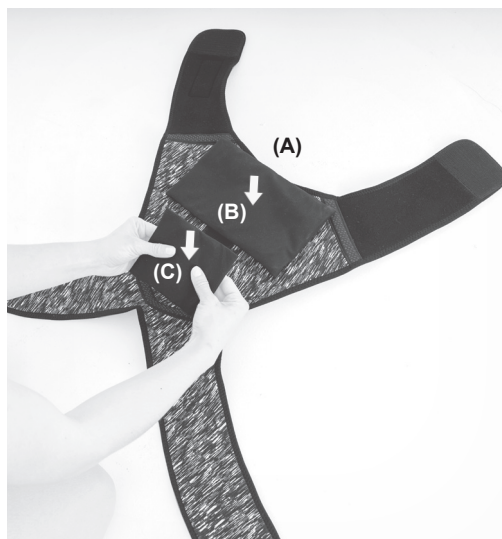

1. PL: Rozepnij ortezę (A) i przypnij kompresy żelowe (B,C) na rzepy.

EN: Open the brace (A) and fasten the gel compresses (B,C) with Velcros.

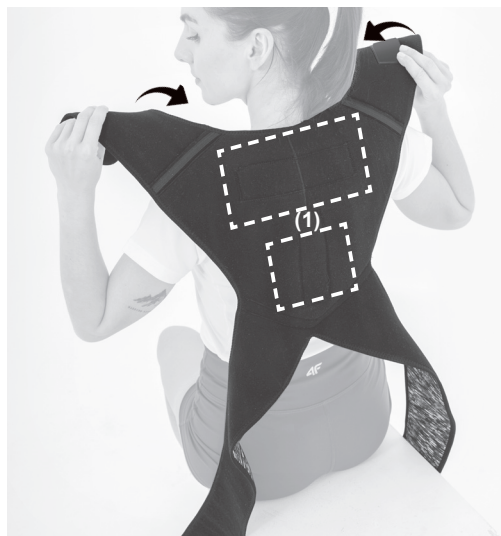

2. PL: Przyłóż ortezę z kompresami do pleców w odpowiednim miejscu (1).

EN: Place the brace with the compress on the back in the right place (1).

PL: UWAGA! Istnieje możliwość przypinania kompresów żelowych (B,C) w dowolnej konfiguracji.

EN: ATTENTION! It is possible to attach gel compresses (B,C) in any configuration.



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy w podanej kolejności (2,3,4,5).
EN: Set the correct compression and fasten the Velcro in the given order (2,3,4,5).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.