


KOD KATALOGOWY	TB-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KRIOTERAPEUTYCZNA
MODEL	TB-02
CODE	TB-02
TRADE NAME	ICE AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-02

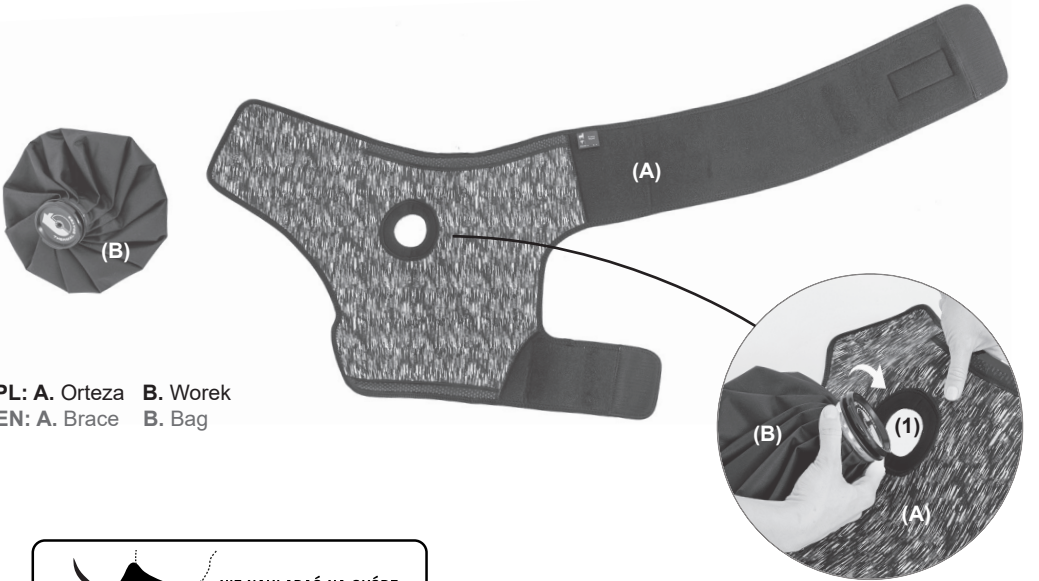

PL: A. Orteza B. Worek
 EN: A. Brace B. Bag




**NIE NAKŁADAĆ NA SKÓRĘ
 JEŚLI PRODUKT JEST
 GORĄCY!**

**DON'T APPLY ON THE SKIN
 IF THE PRODUCT IS HOT!**

1. **PL:** Rozepnij ortezę (A). Uzupełnij worek (B) kruszonym lodem lub gorącą wodą i umieść w otworze (1).
EN: Unfasten the brace (A). Fill the bag (B) with crushed ice or hot water and place it in the opening (1).



2. **PL:** Przyłóż ortezę z kompresem do ramienia w odpowiednim miejscu (2).
EN: Place the brace with the compress on the shoulder in the right place (2).

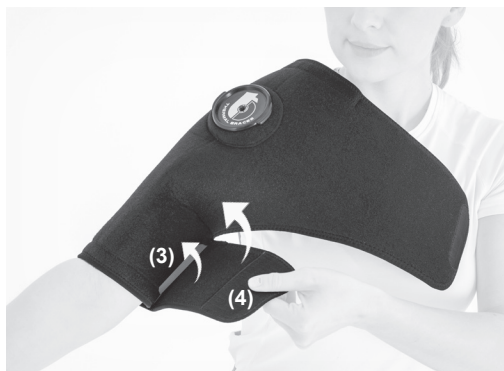

3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij ortezę w podanej kolejności (3,4,5,6).

EN: Set the appropriate compression and fasten the product in the order shown (3,4,5,6).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.