


KOD KATALOGOWY	TB-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KRIOTERAPEUTYCZNA
MODEL	TB-03
CODE	TB-03
TRADE NAME	ICE AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-03

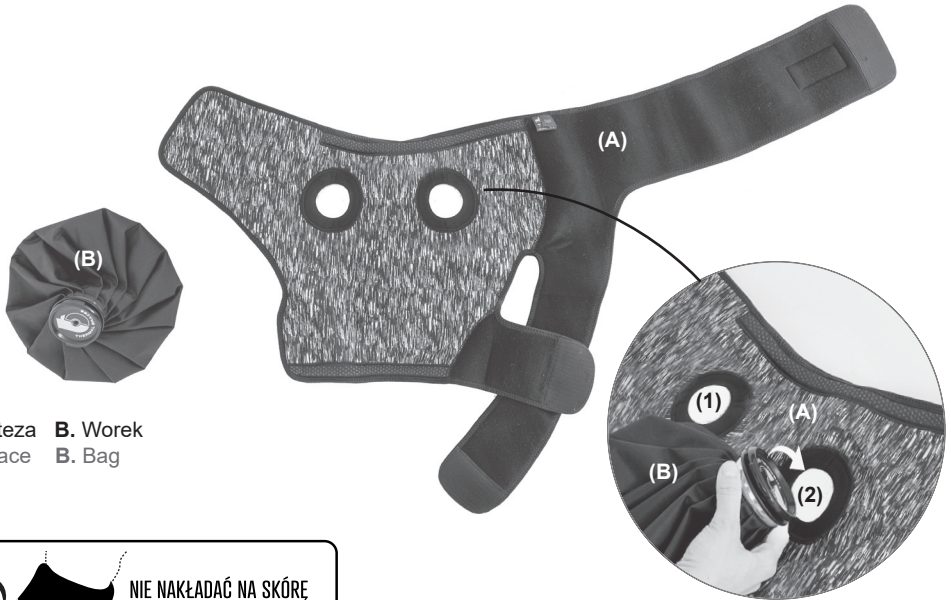

PL: A. Orteza B. Worek
EN: A. Brace B. Bag



1. PL: Rozepnij ortezę (A). Uzupełnij worek (B) kruszonym lodem lub gorącą wodą i umieść w wybranym otworcie (1,2).
EN: Unfasten the brace (A). Fill the bag (B) with crushed ice or hot water and place it in the selected slot (1,2).

PL: UWAGA! Istnieje możliwość stosowania ortozy z dwoma workami jednocześnie.
PL: ATTENTION! It is possible to use an orthosis with two bags at the same time.



2. PL: Przyłóż ortezę z kompresem do ramienia w odpowiednim miejscu (3).
EN: Place the brace with the compress on the shoulder in the right place (3).



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij ortezę w podanej kolejności (4,5,6,7,8).
EN: Set the appropriate compression and fasten the product in the order shown (4,5,6,7,8).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.