


KOD KATALOGOWY	TB-22
NAZWA HANDLOWA	RTEZA Z KOMPRESM CIEPŁO/ZIMNO
MODEL	TB-22
CODE	TB-22
TRADE NAME	HOT/COLD AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-22

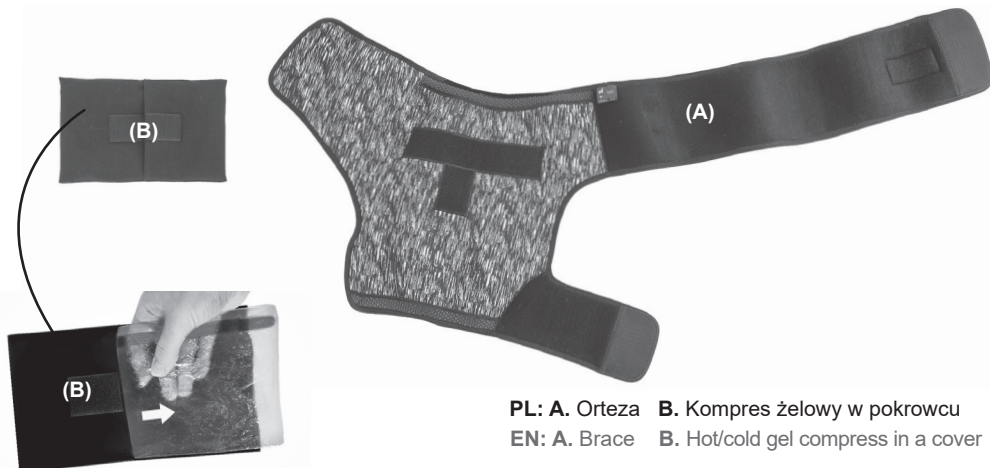

PL: A. Orteza B. Kompres żelowy w pokrowcu
EN: A. Brace B. Hot/cold gel compress in a cover


PL: **UWAGA!** W celu schłodzenia lub ogrzania kompresu (B), należy wyjąć go z pokrowca i umieścić:

- a) w zamrażarce
- b) w kuchence mikrofalowej
- c) lub w gorącej wodzie

EN: **ATTENTION!** In order to cool or warm the compress (B), remove it from the cover and place it:

- a) in the freezer
- b) in the microwave oven,
- c) or in hot water

a)		max. -18°C	120 min.
b)		max. 650W	3x10 s.
c)		max. 80°C	8 min.

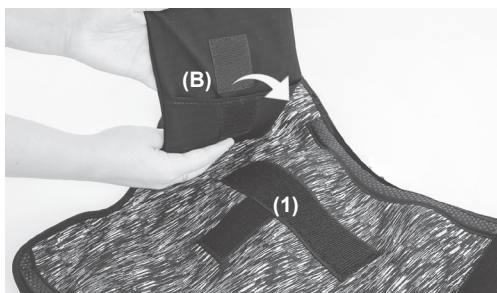


1. PL: Rozepnij ortezę i przypnij kompres żelowy (B) na rzep (1).

EN: Open the brace and fasten the gel compress (B) with Velcro (1).



2. PL: Przyłóż ortezę z kompresem do ramienia w odpowiednim miejscu (2).

EN: Place the brace with the compress on the shoulder in the right place (2).

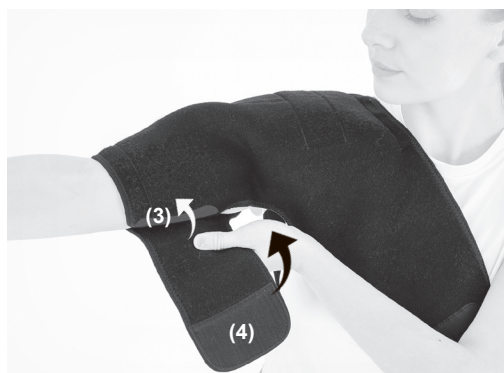

3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij ortezę w podanej kolejności (3,4,5,6).

EN: Set the appropriate compression and fasten the product in the order shown (3,4,5,6).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.