


KOD KATALOGOWY	TB-29
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA Z KOMPRESEM CIEPŁO/ZIMNO
MODEL	TB-29
CODE	TB-29
TRADE NAME	HOT/COLD AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-29

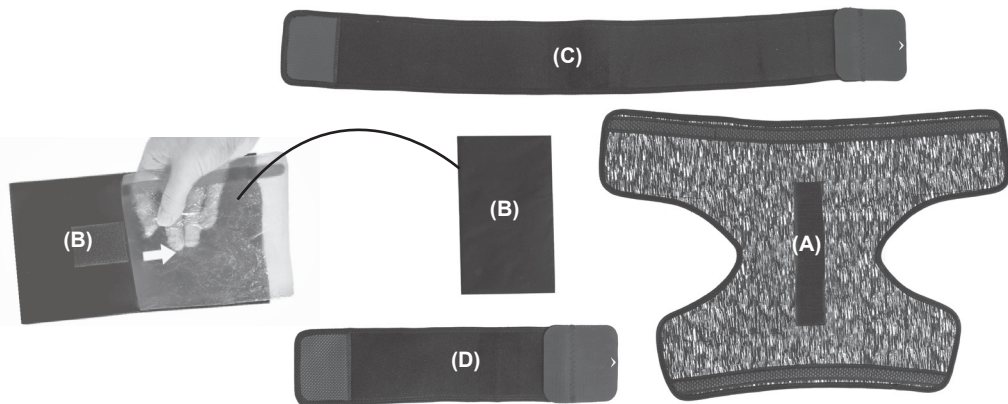

- (A) Orteza / Brace
 (B) Kompres żelowy w pokrowcu / Gel compress in a cover
 (C) Pas biodrowy / Hip belt
 (D) Pas udowy / Thigh belt


PL: UWAGA! W celu schłodzenia lub ogrzania kompresu (B), należy wyjąć go z pokrowca i umieścić:

- a) w zamrażarce
- b) w kuchence mikrofalowej
- c) lub w gorącej wodzie

EN: ATTENTION! In order to cool or warm the compress (B), remove it from the cover and place it:


- a) in the freezer
- b) in the microwave oven,
- c) or in hot water

a)	max. -18°C	120 min.
b)	max. 650W	3x10 s.
c)	max. 80°C	8 min.

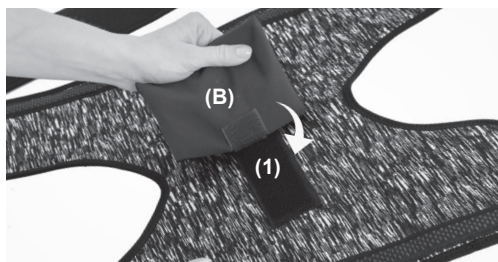




1. PL: Rozepnij ortezę i przypnij kompres żelowy (B) na rzep (1).

EN: Open the brace and fasten the gel pad (B) with Velcro (1).

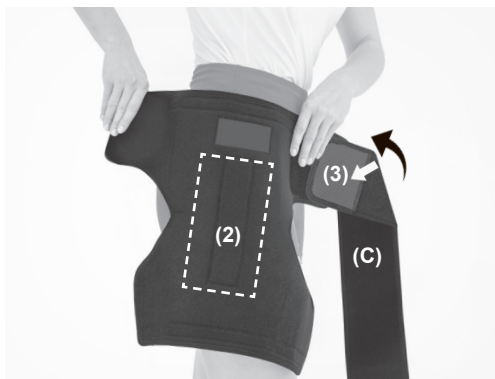


2. PL: Przyłóż ortezę (A) z kompresem (B) w odpowiednim miejscu (2) i przypnij z przodu pas biodrowy (C) na rzep (3).

EN: Place the brace (A) with the compress (B) in the right place (2) and fasten the hip belt (C) to the Velcro fastener (3) at the front.

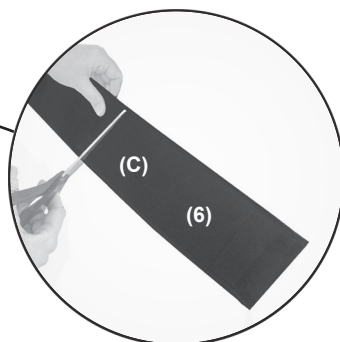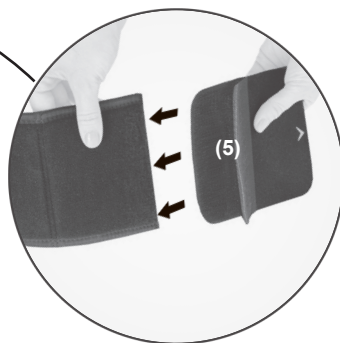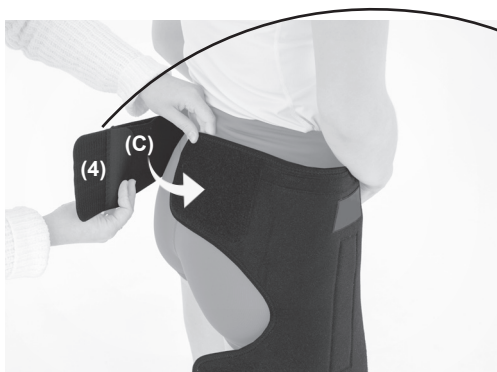

3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pas biodrowy (C) na rzep (4). Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa biodrowego (C), odepnij element rzepowy (5), odetnij zbędną długość (6), przypnij rzep ponownie i zapnij pas (C).

EN: Set the appropriate compression and fasten the hip belt (C) to the Velcro (4). If there is a need to shorten the hip belt (C), unfasten the Velcro element (5), cut off the unnecessary length (6), attach the Velcro again and fasten the belt (C).

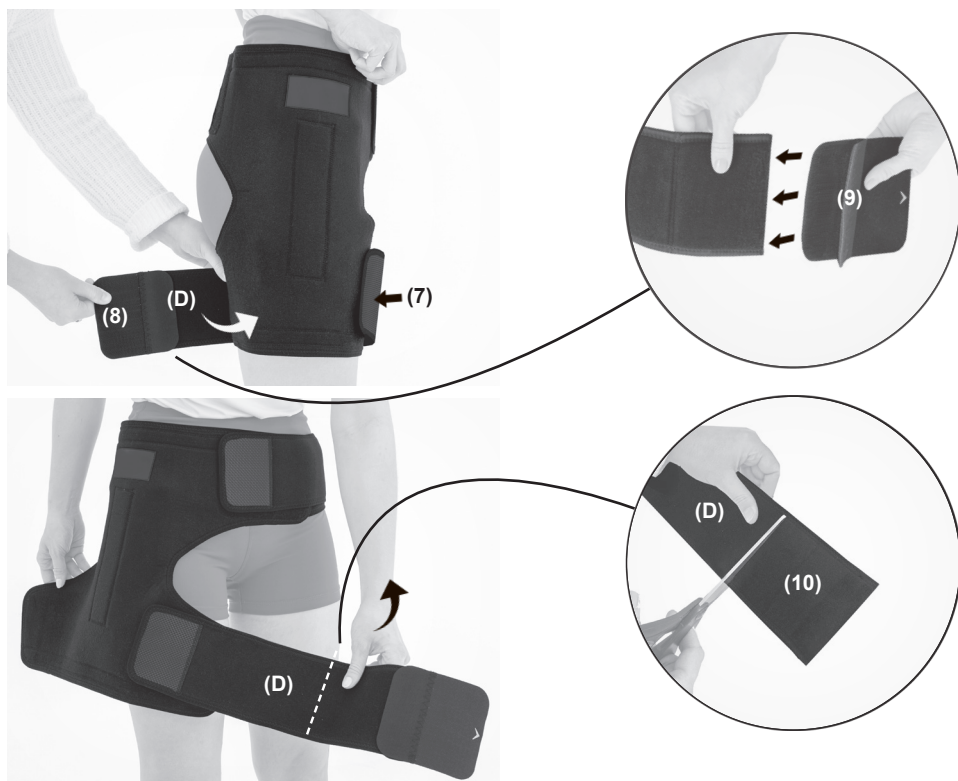

4. PL: Przypnij z przodu pas udowy (D) na rzep (7). Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pas udowy (D) na rzep (8). Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa udowego (D), odepnij element rzepowy (9), odetnij zbędną długość (10), przypnij rzep ponownie i zapnij pas (D).

EN: Fasten the thigh belt (D) to the Velcro strap (7) at the front. Set the appropriate compression and fasten the thigh belt (D) with the Velcro fastener (8). If there is a need to shorten the thigh belt (D), unfasten the Velcro element (9), cut off the unnecessary length (10), attach the Velcro again and fasten the belt (D).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.