



KOD KATALOGOWY	TB-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KRIOTERAPEUTYCZNA
MODEL	TB-01
CODE	TB-01
TRADE NAME	ICE AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-01

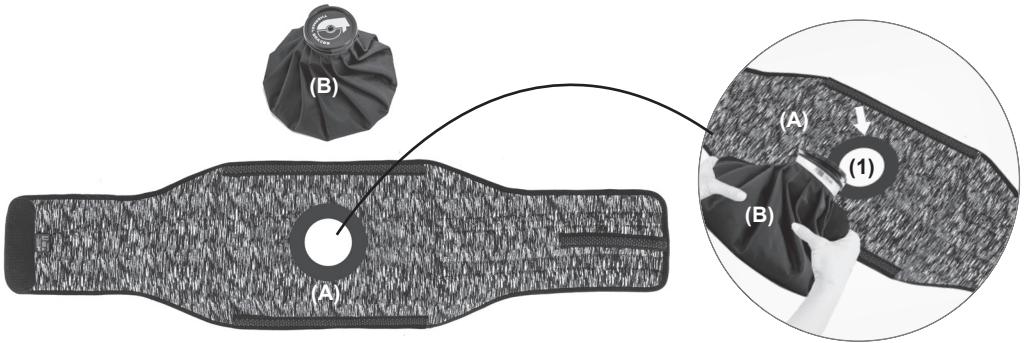

PL: A. Orteza B. Worek
EN: A. Brace B. Bag

- PL:** Rozepnij ortezę (A). Uzupełnij worek (B) kruszonym lodem lub gorącą wodą i umieść w otworze (1).
EN: Unfasten the brace (A). Fill the bag (B) with crushed ice or hot water and place it in the opening (1).

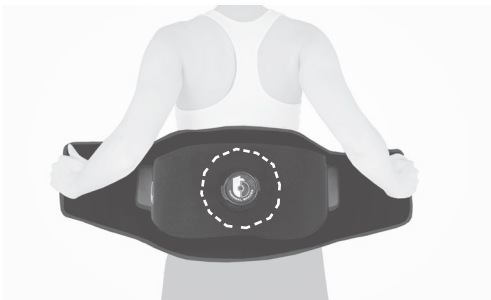

- PL:** Przyłóż ortezę w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij przednie zapięcie na rzep (2).

EN: Place the brace on the lumbosacral section of the spine. Set the correct compression and close the front Velcro closure (2).



3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe na rzepy (3,4).

EN: Set the correct compression and fasten the Velcro straps (3,4).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.